

Kubek Cip-Kup ? nauka picia przez słomkę

Dodany przez kasia

czwartek, 15 sierpnia 2013 16:04 - Poprawiony czwartek, 08 sierpnia 2013 22:15



Bardzo fajna pomoc w nauce picia i ssania. Hania bardzo lubi swój Cip-Kup, a ja go polecam :)

Zastosowanie:

- rozwiązanie do nauki picia przez słomkę,
- łatwiejsze picie dla tych Pacjentów, którzy mają problemy wytworzenia ssania bądź utrzymania go.

Zastawka pozwala na utrzymanie płynu w słonce, redukując tym samym ilość połykanego powietrza i konieczność ponownego wywołania podciśnienia (ssania). Spowalnia on również przepływ umożliwiając kontrolowanie ilości połykanego płynu oraz pomaga w umieszczeniu picia w przedniej części jamy ustnej.

Zastawka jest fabrycznie ustawiona na umiarkowane ograniczenie dopasowane do potrzeb osób ze skłonnościami do aspiracji podczas połykania zbyt dużej ilości płynu na raz i może zostać skrócona, by ułatwić przepływ.

Aby uniemożliwić zagryzanie na słomkę i wsuwanie jej zbyt głęboko do jamy ustnej należy stosować Nakładki blokowe na słomki (LIP BLOKI).

Kubek wykonano z medycznej jakości materiałów nie zawierających ołowiu, lateksu, BPA, ftalanów i PVC. PRODUKT posiada ATEST Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).

W zestawie:

- 10 słomek;
- żółty lip blok;
- pojemnik (kubek).

Czyszczenie: można czyścić w zmywarce do naczyń.

Wszystkie części zestawu są do nabycia oddzielnie.

Kasia Łukasiewicz

Kubek Cip-Kup ? nauka picia przez słomkę

Dodany przez kasia

czwartek, 15 sierpnia 2013 16:04 - Poprawiony czwartek, 08 sierpnia 2013 22:15

Źródło: <http://www.wibratorylogopedyczne.pl/kubek-cip-kup.html>